

symphyse SA

FICHE CONSEIL

Maquillants Universels Arti Stains LFS

Les Arti Stains LFS ont été conçus pour s'adapter à tous type de céramique et à tous les teintiers.

Ils s'utilisent en interne et en externe, et les températures d'utilisation seront adaptées à la porcelaine support.

En règle générale la température d'utilisation sera toujours supérieure à 710°C et comprise entre 50°C et 20°C au dessous de la température de votre 1° cuisson.

Exemples : Synspar 1° cuisson à 945°C = LFS 915 à 925°C, couper le vide entre 815 et 875°C
OPC Low Wear 1° cuisson à 830°C = LFS 780 à 810°C, couper le vide entre 730 et 760°C.
OPC 3 G 1° cuisson à 775°C = LFS 715 à 755°C, couper le vide à 720°C

La température la plus basse donnera un aspect mat et la plus haute donnera un aspect brillant.

Les basses températures ne seront donc utilisées qu'en interne.

Application sur armature céramique de types : Di silicate, Alumine, Leucite, ou Zircone, etc.... rechercher un aspect brillant satiné pour garantir le mouillage et la liaison.

Appliquer sur une surface dépolie ou sablée à 50-100µ (pour la Zircone utiliser au moins 5,5 bars de pression).

Utiliser une température au moins égale et plutôt supérieure de 20 à 30°C au matériau cosmétique.

Couper le vide au delà de 715°C monter sous atmosphère à la T° finale 790°C, et **stabiliser 1 minute.**

Garder à l'esprit que la stabilisation en atmosphère facilite le mouillage et l'infiltration, qu'il est préférable d'appliquer 2 voire 3 couches fines, notamment sur L'Alumine et les Zircone qui sont plus difficiles à colorer.

Pour un maquillage ou infiltration externe (surface) des céramiques pressées à base de Leucite :

Exemples : OPC ou Empress* 1 = LFS 915 à 925°C Compléter avec de l' Universal Glaze (inclus dans le coffret) et dans ce cas cuire sans vide ou couper le vide 100°C en dessous de la T° finale.

Pour d'autres marques ou produits n'hésitez pas à nous demander conseil.

* Empress est une marque appartenant la sté. Ivoclar

symphyse SA , 65, rue Floralia - F -13008 MARSEILLE. Tel : 04 91.73.44.19 +
Fax : 04 91 72 50 63. Adresse Internet : info@symphyse.com

ARTISTAINS™ LFSCOLORPALETTE



HUES PRIMARY



Pink

Yellow

Blue

CUSTOM SECONDARY



Green

Violet

A

HUES SECONDARY



Yellow-Orange

Orange

Dark Orange

TERTIARY



Red-Brown

Grey-Brown

Dark Brown

CHROMAS



B

C

D

CUSTOM CHROMA



1

2

3

VALUES



Black

Blue-Grey

Grey



White

Cream

Complex Grey